



ONESURFACE SPRAY

Wyrób medyczny
kl. IIA
CE 1783

**BEZALKOHOLOWY PREPARAT
DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
NIEINWAZYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH**

- ✓ O właściwościach myjąco dezynfekcyjnych
- ✓ Szerokie spektrum bójcze
- ✓ Bardzo szeroka kompatybilność materiałowa
- ✓ Bez zawartości alkoholu, pochodnych fenolu, aldehydów i chloru

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
LUB ETYKIETĄ. ULOTKA INFORMACYJNA PRZEZNACZONA
DLA UŻYTKOWNIKA PROFESJONALNEGO.**



PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Preparat ONESURFACE SPRAY przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, aeratorów stosowanych w stomatologii oraz wyrobów medycznych stosowanych w badaniach laryngologicznych. Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi

SPEKTRUM DZIAŁANIA

Zakres skuteczności	Czas działania
bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy	60s

STANDARDY BADAŃ

EN 16615, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 17126

OPAKOWANIA

Produkt	REF	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	EAN
butelka 750 ml	KAF G21-1	750ml	12	8682079003568
butelka 1l	KAF G21-2	1000ml	12	8682079003575
kanister 5l	KAF G21-3	5000ml	4	8682079003582

PRODUCENT

KAF GRUP
Atakent Mah. 221 Sk. No:3A
K.ÇEKMECE / İSTAMBUŁ / TURCJA

SKŁAD

Nadtlenek wodoru 0,84%
Chlorek alkilodimetylobenzylamoniowy 0,56%
Chlorek didecydimetyloamoniowy 0,49%
Substancje pomocnicze, woda dejonizowana

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Preparat do użytku profesjonalnego
2. Produkt w formie spray'u. Gotowy do użycia - nie rozcieńczać
3. Nałożyć preparat na powierzchnie w odległości 30 cm za pomocą aplikatora bądź suchej chusteczki
4. Pozostawić do wyschnięcia celem osiągnięcia pożądanego efektu bójczego - 30 sekund
5. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki, etykiety i karty charakterystyki

KLASYFIKACJA PRODUKTU

Wyrób medyczny kl. IIA CE 1783

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów.

Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów.

Zadzwoń: 22 811 03 22
lub napisz: biuro@medilab.warszawa.pl



Medilab Sp. z o.o. Siedziba
ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
☎ +48 22 811 03 22
✉ biuro@medilab.warszawa.pl
medilab.warszawa.pl

Medilab Sp. z o.o. Magazyn
ul. Kłuszyńska 48, 30-499 Kraków
☎ +48 12 264 94 46
✉ logistyka@medilab.warszawa.pl
medilab.warszawa.pl