

# SITEC® Wipes System

System suchych chust do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

## Opis produktu

- Uniwersalne suche chusty do użycia na sucho i na mokro.
- Wykonane z wysokiej jakości niepylącej włókniny o bardzo wysokim współczynniku absorpcji.
- Przenośne, poręczne pojemniki dozujące gwarantują pełną mobilność.
- Szczelne zamknięcie chroni nasączone chusty przed wysychaniem.
- Pojemnik dozujący zapewnia kontrolę dozowania, dostosowany do wymiaru chust.
- Kodowane kolorystycznie pokrywy dozujące.
- Etykieta bezpieczeństwa dołączona do każdej rolki.

## Zastosowanie

- Do nasączania wybranym środkiem gotowym do użycia lub roztworem roboczym środka dezynfekującego w wybranym stężeniu
- Do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych
- Do osuszania powierzchni wyrobów medycznych

## Instrukcja stosowania



1. Zdejmij pokrywę pojemnika dozującego. Stosowanie rękawic przy nasączaniu chust zależy od wskazań producenta środka nasączającego.
2. Zdejmij folię zabezpieczającą, rozpakuj rolkę i umieść ją w pojemniku.
3. Napełnij dozownik gotowym do użycia środkiem lub roztworem roboczym środka o wymaganym stężeniu w ilości min. 2L.
4. Przeciągnij pierwszą chusteczkę przez otwór dozujący w pokrywie i zamknij pojemnik. Po upływie min. 30 minut chusteczki są w pełni nasączone i gotowe do użycia.
5. Opisz etykietę bezpieczeństwa, która jest dołączona do każdej rolki i naklej ją na pojemnik we wskazanym miejscu. Zmieniaj etykietę przy ponownym nasączeniu. Chusteczki po nasączeniu mogą być używane przez okres 30 dni.

Pojemnik dozujący jest wielokrotnego użycia z możliwością dezynfekcji w temp. do 85°C (również maszynowo).

## Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu, chronić przed promieniami słonecznymi, w temp. 5-25 C. Przed nasączeniem chust należy zapoznać się z etykietą oraz przestrzegać zaleceń producenta.

**Rozmiar: 18x39cm**

**Ilość sztuk w 1 opakowaniu: 256 szt.**

**Gramatura: 50gr/m<sup>2</sup>**

**Skład: 70% wiskoza; 30% poliestr**

## Producent:

Barneo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul.Kolejowa 59, 64-300 Nowy Tomyśl

tel./fax 61 44 28 140

www.barneo.pl

Produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy Rady 93/42 EWG



Wyrób medyczny klasy I