



Sani-Cloth® AF

WYRÓB MEDYCZNY KL. IIA CE 2797

**BEZALKOHOŁOWE CHUSTECZKI
DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
NIEINWAZYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH**

- ✓ Bez alkoholu, bez wybielaczy i bez PHMB, nie powodują podrażnień ani uczuleń skóry
- ✓ Nie wymagają aktywacji, nie pozostawiają smug na powierzchni
- ✓ Duża kompatybilność materiałowa
- ✓ Dostępne w opakowaniach typu flow pack, tubach i wiaderkach

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
LUB ETYKIETĄ. ULOTKA INFORMACYJNA PRZEZNACZONA
DLA UŻYTKOWNIKA PROFESJONALNEGO.**



PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Chusteczki Sani-Cloth® AF do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, stetoskopów, kozetek, stolików, mebli medycznych, łóżek, sprzętu rehabilitacyjnego, stomatologicznego oraz unitów. Chusteczki Sani-Cloth AF są kompatybilne ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, szkłem, pleksą, powierzchniami drewnianymi, silikonem, materiałami ze stali nierdzewnej, ceramiką, a także z powierzchniami wrażliwymi na działanie związków utleniających.

SPEKTRUM DZIAŁANIA

Zakres skuteczności	Czas działania
bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy	2 min

STANDARDY BADAŃ

EN 16615, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348

OPAKOWANIA

Produkt	REF	Ilość w op.	Rozmiar poj. chusteczki	Opak. zbiorcze	EAN
wiaderko 225	EAF1110	225 szt.	270x267mm	1	5056012300626
tuba 200	EAF1120	200 szt.	200x200mm	12	5056012300633
flow pack 100	EAF1100	100 szt.	280x200mm	12	5056012300657
flow pack 200	EAF1130	200 szt.	267x210mm	6	5056012301081
flow pack 40	EAF1140	40 szt.	200x200mm	24	

PRODUCENT

PDI (EMEA) Ltd
Pywell Road, Willowbrook Est. Industrial Estate,
Corby - Northants, NN17 5XJ, UK
+44 (0) 8081 697 945, www.wearepdi-intl.com

EC REP

Nex Medical Antiseptics Srl
Via Arluno, 37/39, 20003 Casorezzo MI, Włochy



SKŁAD

Chlorek didecyldimetyloamonu, środki powierzchniowo czynne, środki pomocnicze, substancje pomocnicze

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Preparat do użytku profesjonalnego
2. Produkt w formie chusteczek. Gotowy do użycia - nie rozcieńczać
3. Należy przetrzeć powierzchnię ruchem w kształcie litery S, rozpoczynając od obszaru czystego w kierunku zanieczyszczonego.
4. Tej samej powierzchni nie należy przecierać dwa razy tą samą chusteczką
5. Pozostawić do wyschnięcia celem osiągnięcia pożądanego efektu bójczego
6. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki, etykiety i karty charakterystyki preparatu

KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL. IIA CE 2797

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów.

Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów.

Zadzwoń: 22 811 03 22
lub napisz: biuro@medilab.warszawa.pl



Medilab Sp. z o.o. Siedziba
ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
☎ +48 22 811 03 22
✉ biuro@medilab.warszawa.pl
medilab.warszawa.pl

Medilab Sp. z o.o. Magazyn
ul. Kłuszyńska 48, 30-499 Kraków
☎ +48 12 264 94 46
✉ logistyka@medilab.warszawa.pl
medilab.warszawa.pl