



ONESURFACE WIPES

Wyrób medyczny
kl. IIA
CE 1783

**BEZALKOHOLOWE CHUSTECZKI
DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
NIEINWAZYJNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH**

- ✓ O właściwościach myjąco dezynfekcyjnych
- ✓ Szerokie spektrum bójcze
- ✓ Bardzo szeroka kompatybilność materiałowa
- ✓ Bez zawartości alkoholu, pochodnych fenolu, aldehydów i chloru

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
LUB ETYKIETĄ. ULOTKA INFORMACYJNA PRZEZNACZONA
DLA UŻYTKOWNIKA PROFESJONALNEGO.**



PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Preparat ONESURFACE WIPES przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, aeratorów stosowanych w stomatologii oraz wyrobów medycznych stosowanych w badaniach laryngologicznych. Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi.

SPEKTRUM DZIAŁANIA

Zakres skuteczności	Czas działania
bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy	60s

STANDARDY BADAŃ

EN 16615, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 17126

OPAKOWANIA

Produkt	REF	Ilość w op.	Rozmiar poj. chusty	Opak. zbiorcze	EAN
tuba 100	KAF G36-1	100szt	200x250mm	12	8682079003650
tuba 200	KAF G36-3	200szt	200x200mm	9	8682079003674
flow pack 100	KAF G36-1	100szt	200x250mm	20	8682079003650
flow pack 200	KAF G36-3	200szt	200x280mm	6	8682079003674

PRODUCENT

KAF GRUP
Atakent Mah. 221 Sk. No:3A
K.ÇEKMECE / İSTAMBUŁ / TURCJA

SKŁAD

Nadtlenek wodoru 0,84%
Chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy 0,56%
Chlorek didecydimetyloamoniowy 0,49%
Substancje pomocnicze, woda dejonizowana

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Preparat do użytku profesjonalnego
2. Produkt w formie chusteczek. Gotowy do użycia - nie rozcieńczać
3. Należy przetrzeć powierzchnię ruchem w kształcie litery S, rozpoczynając od obszaru czystego w kierunku zanieczyszczonego.
4. Tej samej powierzchni nie należy przecierać dwa razy tą samą chusteczką.
5. Pozostawić do wyschnięcia celem osiągnięcia pożądanego efektu bójczego
6. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki, etykiety i karty charakterystyki preparatu

KLASYFIKACJA PRODUKTU

Wyrób medyczny kl. IIA CE 1783

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów.

Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów.

Zadzwoń: 22 811 03 22
lub napisz: biuro@medilab.warszawa.pl



Medilab Sp. z o.o. Siedziba
ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
☎ +48 22 811 03 22
✉ biuro@medilab.warszawa.pl
medilab.warszawa.pl

Medilab Sp. z o.o. Magazyn
ul. Kłuszyńska 48, 30-499 Kraków
☎ +48 12 264 94 46
✉ logistyka@medilab.warszawa.pl
medilab.warszawa.pl