



Globacid® AF med

WYRÓB MEDYCZNY KL.IIA CE.0537
PRODUKT BIOBÓJCZY
POZWOLENIE NR 8353/21

PREPARAT DO SZYBKIEJ DEZYNFEKЦИИ POWIERZCHNI NA BAZIE ALKOHOLU

- ✓ Nie zawiera QAV, pochodnych fenolu, aldehydów
- ✓ Nie pozostawia śladów na dezynfekowanych powierzchniach
- ✓ Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością
- ✓ Krótki czas działania
- ✓ Może być stosowany na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
LUB ETYKIETĄ. ULOTKA INFORMACYJNA PRZEZNACZONA
DLA UŻYTKOWNIKA PROFESJONALNEGO.**



PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Preparat Globacid AF med jest przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu w tym powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością i produktami spożywczymi.

SKŁAD

Etanol 15g
Propan-2-ol 60g

SPEKTRUM DZIAŁANIA

Zakres skuteczności	Czas działania
bakteriobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy	60 s

STANDARDY BADAŃ

EN 16615, EN 13624, EN 13697, EN 14348,
EN 14563, EN 14476, EN 13727, EN 17387

OPAKOWANIA

Produkt	REF	Pojemność	Opak. zbiorcze	EAN
1L butelka ze sprysk.	NOVA104-1MED	1000ml	12	4743239024763
1L butelka flip flop	NOVA104-1MED-FC	1000ml	3	
5L kanister	NOVA104-5MED	5000ml	3	4743239012395

PRODUCENT

Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe, SAKU VALD /
HARJUMAA / ESTONIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Preparat do użytku profesjonalnego
2. Produkt w formie spray'u. Gotowy do użycia - nie rozcieńczać
3. Nałożyć preparat na powierzchnie w odległości 30 cm za pomocą aplikatora bądź suchej chusteczki
4. Pozostawić do wyschnięcia celem osiągnięcia pożądanego efektu bójczego - 30 sekund
5. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki, etykiety i karty charakterystyki

KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL.IIA CE 0537/ PRODUKT
BIOBÓJCZY POZWOLENIE NR 8353/21

Jesteśmy do Państwa dyspozycji,
aby udzielić kompleksowych informacji
na temat naszych produktów.

Prosimy o skontaktowanie się
z naszym działem handlowym w celu
uzyskania szczegółów.

Zadzwoń: 22 811 03 22
lub napisz: biuro@medilab.warszawa.pl



Medilab Sp. z o.o. Siedziba
ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
☎ +48 22 811 03 22
@ biuro@medilab.warszawa.pl
medilab.warszawa.pl

Medilab Sp. z o.o. Magazyn
ul. Kłuszyńska 48, 30-499 Kraków
☎ +48 12 264 94 46
@ logistyka@medilab.warszawa.pl
medilab.warszawa.pl